

# Zkrácený návod k provozu



**Indikátor provozu**  
Indikátor pro provoz, varování, chyby

**Infračervené rozhraní**

**Normální program**  
Mytí a dezinfekce znečištěných nádob k ošetřování

**Oplachování okraje**  
(pro zvláštní výlevku)  
Volba Oplachování mycí komory

**Indikace**  
pro varování nebo chyby je třeba vyrozumět technickou službu..  
Tlačítko převzetí potvrdí chybu vypne signál

**Intenzivní program**  
Mytí a dezinfekce silně znečištěných nádob k ošetřování

**Krátký program**  
Mytí a dezinfekce lehce znečištěných nádob k ošetřování.  
(např. lahví na moč).

**Kurzorové pole**  
Tlačítka ▲ ▼ pro počet průběhů programu,  
Tlačítka ◀ ▶ viz podrobný návod k obsluze

**TOPIC**  
**m**  
**MEIKO**

