



TopLine

Sécurité sur toute la ligne



TopLine – Une sécurité convaincante



La sécurité hygiénique est plus importante que jamais dans le domaine des soins, où la santé des patients passe avant tout.

Une technologie flexible, adaptable aux circonstances, est indispensable pour un reconditionnement parfaitement hygiénique. MEIKO vous offre la solution de nettoyage et de désinfection idéale. Les appareils de la gamme *TopLine* s'adaptent de manière optimale aux exigences individuelles de vos patients et aux différentes infections.

Les lave-bassins *TopLine* offrent un confort exceptionnel : ils permettent en effet d'ajuster la valeur A_0 aux besoins du moment – c'est vous qui choisissez le programme. La valeur A_0 requise pour l'hygiène de base ou au cas par cas peut être sélectionnée parmi les suivantes en concertation avec le service d'hygiène hospitalière : A_0 60, A_0 600, A_0 3000.

Des solutions propres et écologiques pour une hygiène et une rentabilité optimales – made by MEIKO.

Une propreté absolue en trois étapes :



1 Sélectionner le programme de nettoyage selon le type d'ustensiles de soins et le degré de salissure – maintenir la touche enfoncée.



2 Les valeurs A_0 disponibles sont affichées (A_0 60 / A_0 600 / A_0 3000). Une fois que la valeur choisie est atteinte, relâcher la touche.



3 Le programme démarre dès que la touche est relâchée.

TopLine – Plus qu'un simple lave-bassin

Avec le lave-bassin *TopLine* de MEIKO, vous jouez la carte de la sécurité car ce laveur-désinfecteur offre une sécurité totale. Qu'il s'agisse de son utilisation ou du reconditionnement des ustensiles de soins, le TopLine séduit par une technologie garantissant la sécurité du patient comme celle du personnel soignant. Le tout conformément à la norme EN ISO 15883. Découvrez à présent les points forts du lave-bassin MEIKO *TopLine* – ses qualités vous convaincront !

Déconnexion du réseau d'eau potable, type AA, conforme à la norme EN 1717

Commande électronique *MIKE 2*

Détecteur de proximité pour l'ouverture et la fermeture de la porte (option)

Système de gicleurs pour un nettoyage intensif


Chambre de lavage emboutie autonettoyante

Puissant gicleur rotatif

Contrôle du siphon

Filtre HEPA (H13)

Commande au pied pour l'ouverture et la fermeture de la porte (option)

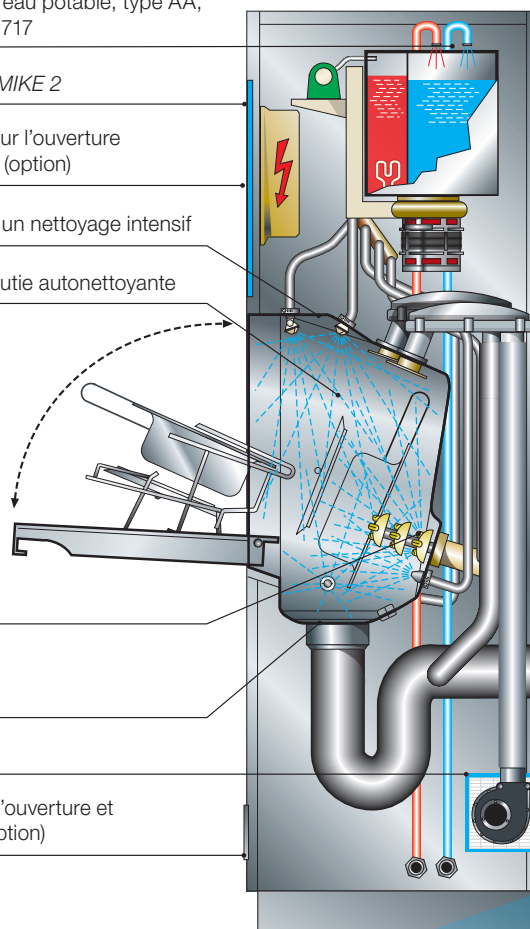

Steam Stop

Ce système assure une parfaite étanchéité à la vapeur et de ce fait, une sécurité de travail et d'hygiène maximale.

Power Clean

Le gicleur rotatif performant et le système de lavage optimisé disposé tout autour assurent un nettoyage efficace de vos ustensiles de soins, jusque dans les moindres recoins.

Thermo Control

Contrôlé par des sondes de température se surveillant mutuellement, ce système de commande des valeurs A_0 librement sélectionnables* garantit une sécurité de désinfection au plus haut niveau.

* A_0 60, A_0 600, A_0 3000.



Dry&Cool

Le séchage et le refroidissement au moyen d'air filtré garantissent une hygiène parfaite des ustensiles de soins et permettent de les saisir immédiatement.

T.A.D.

La fonction *Total Auto Disinfection (T.A.D.)* entre chaque cycle de nettoyage protège parfaitement l'ensemble du système de circulation d'eau de toute recontamination.




Chem Code

Ce système unique de codage des lances d'aspiration permet d'éviter toute confusion entre détergent et produit de rinçage et garantit ainsi la validité du processus.

Ca²⁰ Stop

Commandé par capteur, le système de contrôle du dosage de l'adoucisseur avec produit de rinçage et du détergent assure la sécurité de fonctionnement de l'appareil.

La gamme MEIKO *TopLine* offre de nombreuses possibilités d'aménagement et s'adapte à chaque local vidoir. De l'appareil individuel (en pose libre sur socle, fixé au mur ou intégré dans le cabinet de toilette) au combiné de soins compact, en passant par le modèle encastré sous le plan de travail : avec la gamme *TopLine*, vous êtes sûr de trouver une solution répondant à vos besoins ! Pour en savoir plus sur les différentes configurations possibles, veuillez consulter notre brochure actuelle « Aperçu de la gamme MEIKO *TopLine* ».

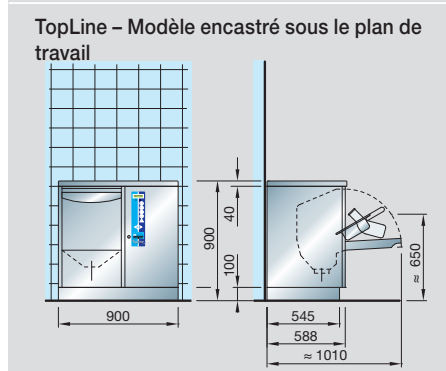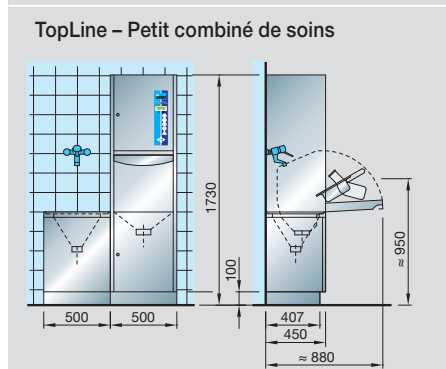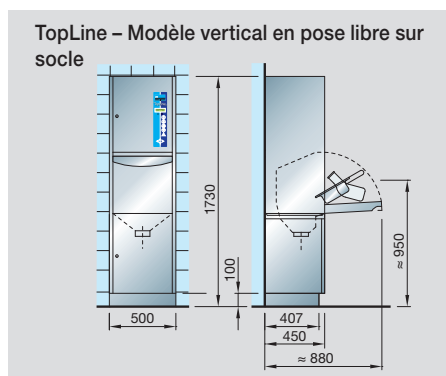

TopLine 10

Conçu pour un montage mural avec garde au sol. Modèle de base. Peu encombrant et prêt à être raccordé.



TopLine 20

Petit combiné de soins comprenant un *TopLine 20* avec socle et un vidoir adapté (option).



SAN 14 B

Combiné de soins compact comprenant un *TopLine 40*, un vidoir, un lave-mains et un plan de dépose. Avec protection anti-éclaboussures et bord relevé.



SAN 20 W

Combiné de soins avec placard de 600 mm. Comprend un *TopLine 40*, un vidoir, un évier et un plan de dépose. Avec protection anti-éclaboussures et bord relevé.

L'équipe MEIKO sera heureuse de vous aider à trouver la solution de désinfection adaptée à vos besoins particuliers. Un simple appel suffit !



MEIKO FRANCE SAS · Parc de l' Esplanade - Bâtiment K, 1 rue Niels Bohr
FR-77462 Saint-Thibault-des-Vignes
Tel. +33 1 64156520 · Fax +33 1 64617568
www.meiko.fr · contact@meiko.fr

MEIKO BVBA · Industriepark West 75 · BE-9100 Sint-Niklaas
Tel. +32 78 150279 · Fax + 32 78 150 281
www.meiko-bps.be · info@meiko-bps.be

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · CH-8117 Fällanden
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · DE-77652 Offenburg
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

