

Instrucciones breves de uso

Indicación de funcionamiento
Indicación de funcionamiento, avisos, errores

Interfaz de infrarrojos

Programa corto ①

Programa normal ②

Programa intensivo ③

Enjuague borde
(para desagüe separado) opción enjuague de cámara de lavado

Indicación para avisos o errores
Informar al servicio técnico
Tecla de confirmación
para acusar recibo de errores / después de pulsarla desaparece la señal

Campo de cursor
Teclas ▲ ▼ para número de secuencias de programa,
Teclas ◀ ▶ ver manual de instrucciones detallado

1. Abrir la puerta de la cámara de lavado. Infrarrojos o pulsador de pie opcional.

2. Insertar el artículo a lavar en la posición prevista en el portarrecipientes.

3. Elegir el programa de lavado según el nivel de suciedad e iniciarlo pulsando ligeramente la tecla de programa correspondiente. La puerta se cierra automáticamente.

4. Después de finalizar el programa abrir la puerta de la cámara de lavado. Infrarrojos o pulsador de pie opcional.

Precaución
Peligro de aprisionamiento
El movimiento de la puerta puede aplastar los dedos, la mano y el brazo.

- No introducir las manos durante el movimiento de la puerta.
- Avistar al técnico de la casa o al servicio para eliminar el bloqueo de la puerta.