

Mode d'emploi abrégé

Affichage du fonctionnement
Affichage pour le fonctionnement, avertissements, défauts

Interface infrarouge

Programme court ①

Programme normal ②

Programme intensif ③

Chasse d'eau
(pour vidoir séparé) option rinçage de chambre de lavage

Affichage
pour avertissements ou défauts
Contactez le service technique
La touche d'acceptation
acquiesce les défauts / coupe le signal

Champ de curseur
Touches ▲ ▼ pour le nombre d'exécutions de programme,
Touches ◀ ▶ voir le mode d'emploi détaillé



1. Ouvrir la porte de la chambre de lavage. Infrarouge ou pédale en option.



2. Placer les ustensiles à laver en position adéquate dans le support.



3. Sélectionner le programme de nettoyage en fonction du degré de saleté et enclencher le programme en exerçant une légère pression sur la touche de programme correspondante. La porte se ferme automatiquement.



4. À la fin du programme, ouvrir la porte de la chambre de lavage. Infrarouge ou pédale en option.



PRUDENCE

Risque de se coincer les doigts

Les mouvements de porte peuvent coincer les doigts, les mains et les bras.

- Ne pas intervenir sur le mouvement de la porte.
- Contacter le service d'entretien ou de maintenance pour débloquer la porte.